



N300

Schmerzhafter Ohrdruck?

Der N300 lindert schmerzhaften Ohrdruck, der häufig z.B. beim Fliegen, Tauchen oder Bergsteigen auftritt, wenn der Druckausgleich im Mittelohr gestört ist.

Plazieren Sie einfach das Ohrstück im äusseren Gehörgang. Durch Drücken auf die Membran erzeugt der N300 milden, negativen Druck und assistiert Ihnen so beim Druckausgleich.

Der N300 kann bei ersten Anzeichen von Ohrdruck angewendet und der Vorgang beliebig oft wiederholt werden.

Wie funktioniert es?

Durch die Anwendung einer leichten negativen Druckbehandlung unterstützt der N300 den Druckausgleich im Mittelohr, indem er das Trommelfell und die Eustachische Röhre entspannt und so das Mittelohr wieder ausreichend belüftet.

Wie wende ich den N300 an?

Der N300 ist einfach zu bedienen und eignet sich für Erwachsene und für Kinder (kleineren Kindern sollten Erwachsene bei der Anwendung assistieren):

Entfernen Sie die Schutzkappe, wickeln Sie den Schlauch ab und nehmen Sie eine bequeme Sitzhaltung ein. Führen Sie das Ohrstück in den äusseren Gehörgang ein und halten Sie es in einer fest anliegenden bequemen Position.


Sobald sich das Ohrstück richtig eingepasst haben, drücken Sie mit dem Daumen auf die Membran, die sich in der Mitte des N300 befindet und lassen anschließend wieder los. Hierbei sollten Sie einen leichten Saugdruck im Gehörgang verspüren. Unmittelbar nachdem Sie diesen Ansaugdruck verspüren schlucken Sie, um den einsetzenden Druckausgleich im Mittelohr zu unterstützen. Ein Glas Wasser erleichtert Ihnen dabei den Schluckvorgang.

Wenn Sie diesen Vorgang ein paar Mal wiederholt haben und die erwünschte Wirkung eintritt, wickeln Sie den Schlauch wieder um das Gerät und setzen die Schutzkappe auf. Vergewissern Sie sich, dass die Schutzkappe immer auf dem N300 ist, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Es ist so einfach!

Ist der Druck sicher ?

Der N300 wurde mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das den erzeugten Ansaugdruck begrenzt. Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsdruckbegrenzung. Egal wie stark Sie auf die Membran drücken, der N300 erzeugt keinen übermässigen Druck.

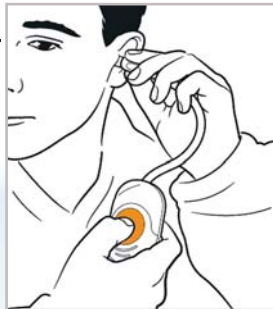

Der N300 wurde von dem renommierten HNO-Arzt Prof. Dr. med. Burkhard Franz entwickelt.

Nach Beendigung des Medizinstudiums in Deutschland und der Qualifikation zum HNO-Facharzt nahm Prof. Dr. Franz Anfang der 1980er am „Bionic Ear Program“ (Entwicklung des Cochlear Implants) in Melbourne, Australien, teil. Später gründete er die „Tinnitus & Balance Clinic“ in Melbourne, Australien. Mit mehr als 80 Publikationen galt seine Hingabe Menschen mit Gleichgewichtsstörungen und Problemen des Innenohres. Nach mehrjähriger eigener Forschungsarbeit wurde von Prof. Dr. Burkhard Franz der N300 entwickelt, um Menschen mit schmerzhaften Ohrdruckproblemen Linderung und Abhilfe zu verschaffen.



 Made in GERMANY

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns unter:

Enttex GmbH
Postfach 61 03 41
30603 Hannover
GERMANY



www.enttex.de

Befreit von Ohrdruck

Der N300 lindert schmerzhaften Ohrdruck, zum Beispiel beim Fliegen, Tauchen oder Bergsteigen



enttex[®]

N300 Befreit von Ohrdruck

