

# P100

enttex®

Bei Morbus Ménière

- Zur Linderung von Symptomen der Ménièreschen Erkrankung
- Keine Batterien, kein elektronischer Anschluß
- Klinisch erprobt
- Geringes Gewicht
- Taschenformat

## Häufig gestellte Fragen

F.: Wird der P100 meine Ménièresche Erkrankung heilen?

A.: Der P100 gibt dem Patienten Linderung von den Symptomen.

Eine Heilungsmethode ist bislang unbekannt.

F.: Brauche ich ein Ventilationsröhrchen (Paukenröhrchen) wenn ich den P100 verwende?

A.: Ja. Wir empfehlen zur korrekten und effektiven Behandlung die Verwendung des P100 in Verbindung mit einem Röhrchen.

F.: Ist der erzeugte Druck sicher für mein Ohr?

A.: Ja. Der P100 hat ein Sicherheitsventil, damit der Anwender des Gerätes dem Ohr keinen zu hohen Druck zuführen kann. Jedes Gerät wurde auf den korrekten Druck überprüft.

F.: Hat der P100 reguläre medizinische Genehmigungen?

A.: Ja.

F.: Ist der P100 klinisch erprobt?

A.: Der P100 wurde in verschiedensten Kliniken der Welt mit großem Erfolg klinischen Tests unterzogen.

Patienten, die Geräte getestet haben, weigerten sich sogar, diese zurückzugeben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns unter:

Enttex Europe  
Postfach 61 03 41  
30603 Hannover  
GERMANY



[www.enttex.de](http://www.enttex.de)





„Ich verwende den P100 für beide Ohren und hatte bisher keine Schwindelanfälle mehr. Mein Befinden ist fast normal, manchmal sogar besser als nur normal. Ich kann Ihnen und dem P100 nicht genug danken. Ich bin davon überzeugt, daß dieses Gerät funktioniert und kann es jedem Betroffenen bei entsprechender Beratung nur empfehlen.“

Herr D.S., Ménière-Patient

## DIE MÉNIÈRESCHE ERKRANKUNG

Bei der Ménièreschen Krankheit handelt es sich um eine Erkrankung des Innenohres, die Ihr Gehör und Ihr Gleichgewicht beeinträchtigen kann.

Die Symptome der Ménièreschen Erkrankung sind Schwindelanfälle in Verbindung mit Hörverlust, Tinnitus und Druckgefühl im Ohr. Diese Symptome werden auf ein Ungleichgewicht der beiden Flüssigkeitskammern des Innenohres zurückgeführt. Die Ursache dieses Ungleichgewichtes ist unbekannt. Bis zum heutigen Tage gibt es kein Heilmittel, und die Behandlung konzentriert sich allein auf die Linderung der Symptome.

## DIE NIEDRIGDRUCK-IMPULSTHERAPIE

Seit geraumer Zeit ist bekannt, daß Patienten, die an der Ménièreschen Erkrankung leiden, empfindlich auf leichten negativen Druck reagieren. Untersuchungen haben ergeben, daß die Ausübung positiven Drucks die Symptome der Ménièreschen Erkrankung lindern kann. Die Verabreichung positiver Druckimpulse macht sich diese Beobachtung zunutze. Der P100 wurde gebaut, um positive Druckimpulse sicher zu verabreichen. Das Gerät hat seine guten Wirkungen in klinischen Studien, die in Südafrika und Australien durchgeführt wurden, erwiesen.

Positive Druckimpulse werden dem Innenohr über den äußeren Gehörkanal zugeführt. Um das Innenohr zu erreichen und dort zu wirken, muß ein Plastikventilationsröhrchen in das Trommelfell eingepaßt werden. Dieser Eingriff kann problemlos unter örtlicher Betäubung in der Praxis eines Chirurgen, bzw. in einem Operationssaal durchgeführt werden.

## DER P100

Der P100 wurde von einem weltweit renommierten Hals-Nasen-Ohrenarzt entwickelt, um Patienten, die an der Ménièreschen Erkrankung leiden, Linderung zu bieten. Auf Grund der handlichen Größe kann der Patient den P100 in der Tasche tragen und Impulse sofort bei Bedarf zur Linderung der Symptome verabreichen.

### Die Behandlung ist einfach:

Entfernen Sie die Schutzhülle, wickeln Sie den Schlauch vom Gerät und führen Sie mit der einen Hand das Ohrstück in Ihren Ohrkanal ein, während Sie mit der anderen Hand das Gerät halten. Drücken Sie mit Ihrem Daumen auf die Membran, um somit Luftdruckimpulse zu verabreichen. Nach Durchführung der Behandlung wickeln Sie den Schlauch wieder sorgfältig um das Gerät und stecken es zurück in die Schutzhülle.

Die Ohrstücke sind abnehmbar und können mit einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden. Außerdem können die Ohrstücke leicht ersetzt werden.

Mehr Informationen über den P100 finden Sie auf unserer Website [www.enttex.com](http://www.enttex.com)



„... Seitdem ich Ihr Gerät dreimal täglich während der letzten fünf Monate benutzt habe kann ich wieder putzen, kochen, waschen und sogar mit meinem Motorroller zum Einkaufen fahren...“

